

◆ 細胞學檢體處理流程

1. 檢體送件注意事項

1.1 檢體瓶上需有病理標籤且資料完整須雙簽名

1.2 檢體瓶或是夾鏈袋上需貼防偽標籤

2. 檢體採集注意事項

2.1 體液的收集

2.1.1 胸水、腹水、心囊積水、關節積水因某些檢體含大量蛋白質會發生凝固故須加入少許抗凝劑混合保存於冰箱

2.1.2 如果檢體為 CSF 不要加抗凝劑把第二瓶送檢(因第一瓶可能有血液會影響診斷)

2.1.3 檢體量：胸水、腹水：5 - 50 ml；CSF：1 ml

2.2 尿液的收集

2.2.1 不要收集早晨第一泡尿

2.2.2 如未能馬上送檢須保存於 4°C 冰箱 24 小時內送檢

2.2.3 檢體量 5-50ml

2.2.4 原則上收集尿液時須請病人 15 分鐘喝一杯水連續 2-3 小時，在第 2 小時末了請病人排尿但不收集，再過 1 小時解尿再收集。導尿取尿時亦請用第二次的尿液送檢。但考慮臨床端送檢方便除非收到的檢體變化太大才會要求重留。

2.3 膿液檢體

2.3.1 檢體量多的時候可以用 TB culture 的檢體瓶收集

2.4 檢體量很少只有零點多則直接抹在玻片上，如果太厚的話就拉片之後直

接放入 95%酒精固定至少 30 分鐘後送件